

ご使用前に必ずお読みください

この度は、当社製品をお買上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

バスびたマット「フィオーレ」を、安全に安心してご利用頂く為に、次のことをお守りくださいませ。
本品は吸盤の吸着式です。マットの吸盤が、浴槽にしっかりと吸着しない場合は、危険ですので絶対に使用しないでください。

【設置方法】

- 浴槽内にお湯やお水をかけて、少し濡らした状態でマットの吸盤を下にして設置し、真上からマット全体を強く押さえ、しっかりと吸盤が吸着するよう装着して下さい。
- 裏面 91 個の吸盤がしっかりと吸着したことを確認して、お湯を張ってご使用下さい。

【使用上の注意】

- 本品滑り止め加工の無い浴槽の為の、浴槽内滑り止めマットです。必ず浴槽内でのみ使用して下さい。
- ステンレスや、ホーローであれば吸着致しますが、滑り止め加工のされた浴槽、木製の浴槽、凹凸のある浴槽といった浴槽の材質によっては、吸着しないものや吸着しにくいものもございます。その場合、一度デモ機で一度お試しになられてからご購入願います。
- 吸盤がしっかりと吸着しない場合は、絶対に使用しないでください。浴槽によっては吸着しない場合がございますので、その場合は絶対に使用しないでください。
- お湯を張っている際に、マットが浮いてくる場合は、使用を止めてやり直して下さい。
- 使用する際は、やさしく足をマットに乗せ、固定されていることを確認して下さい。乱暴に足を乗せると、マットが動くことがあり危険です。
- マットを設置する場所は、必ずぬめりや汚れを落としてから使用して下さい。
- 定期的にマットの表面・裏面のぬめりや汚れを落として使用して下さい。
- 入浴時以外は、マットを浴槽から取り出して下さい。
- 使用状況により、変色や色あせが生じることがあります。
- 高温になる場所に長時間放置しないで下さい。また乾燥器等は絶対に使用しないで下さい。
- 本品は、ポリ塩化ビニール（PVC）製で、特有の臭いがあります。臭いは時間の経過とともに薄れていきます。臭いが気になる方は、何度かマットを、お湯やお水で洗い流し、日数をおいて臭いが薄くなってから使用して下さい。
- 万一、ご気分を害するような場合は、ご使用をお止め下さい。

【お手入れ方法】

- 中性洗剤を使い、硬いブラシ等は避け、やわらかいスポンジ等で手洗いして下さい。
- 天日干しは避けて下さい。
- 研磨剤入りのスポンジやタワシ、磨き粉等は使用しないで下さい。
- 塩素系洗剤、漂白剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないで下さい。



ボディドクターメディカルケア株式会社

〒606-8152 京都市左京区一乗寺下町 56-1

TEL075-724-8412 (代) FAX075-724-8413

E mail support@bdmc.jp

URL <http://www.bdmc.jp>