

床ずれ防止ベッドパッド ブレイラプラス

※洗濯ネット付

介護保険貸与製品：床ずれ防止用具

定価 20,000円 (税別)

91・88 レギュラー・ショート4サイズ

素材：ポリエステル100%

裏面四隅すべり止めゴム付き

防水マットレスに通気性をプラス
エアマットレスに除湿性をプラス
低反発マットレスに動作性をプラス
硬いマットレスに体圧分散性をプラス



月額レンタル料金

円

ご利用者負担額

円



ブレイラプラスは、2層目に、三次元立体編物「フュージョン®」>旭化成商事(株)を使用しています。

●夏涼しく、冬暖かい、年中使えるベッドパッド。

1層目に0.5cmの立体メッシュ、2層目に1cmの三次元立体編物で構成された、厚さ1.5cmの薄型床ずれ防止ベッドパッドです。身体とマットレスの間に空気の通り道(空気層)を作り、汗ばむ季節の使用でも快適にご利用頂けます。寒い季節には、パッドを敷毛布などで包んで外気を遮断して頂くだけで、羽毛布団のように温かくなります。

●ECO 消臭機能付き (無光触媒)

人が直接寝る1層目の立体メッシュには、人や動植物にもやさしい、無光触媒加工「エコキメラ®」を施してあります。空気中の水分子に酸化還元作用により、触媒反応するので、24時間ずっと、消臭、防汚、抗菌、防カビ効果があります。

●丸洗いOK、速乾すぐ使える。

ブレイラプラスは、汚れたら6つに折りたたんで、付属の洗濯ネットに入れて、洗濯機で約30分洗うだけ。脱水後約30分程度ですぐ使用できます。失禁時にもご家庭で簡単に洗えます。

●耐久性に優れ、へたりにくい。


2層目「フュージョン®」は、回復性、ストレッチ性、耐久性に優れた繊維「帝人ソロテックス®」で出来ています。国産車最高級クラスのシートにも採用されている薄くても丈夫な素材です。

●抜群の体圧改善効果


ブレイラプラスは、一般的なウレタンマットレスやエアマットレスの上に敷くだけで、それぞれ体圧を半減させる効果を示しました。これらは、ブレイラプラスを敷くだけで、一般的な製品でも、床ずれ防止の効果が得られるということを証明しています。(右図検査：タカノ(株)男性 177cm 70kg 5分後)

体圧改善効果 (臀部最大値をそれぞれ約50%改善)


ウレタンマットレスのみ 80 mm/hg + ブレイラプラス 40 mm/hg

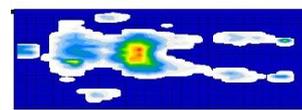

エアマットレスのみ 52 mm/hg

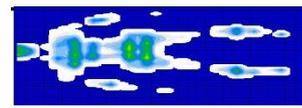

+ ブレイラプラス 24 mm/hg

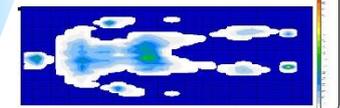

品名	規格	品番	JAN	TAIS	Size	重量
床ずれ防止ベッドパッド	910R	BRPS-910R	4582328920476	01149-000012	91×195×1.5cm	2.0 kg
	910S	BRPS-910S	4582328920490	01149-000013	91×183×1.5cm	1.8 kg
ブレイラプラス	830R	BRPS-830R	4582328920483	01149-000011	83×195×1.5cm	1.9 kg
	830S	BRPS-830S	4582328920506	01149-000010	83×183×1.5cm	1.7 kg



MADE IN JAPAN

ブレイラプラスは、すべて国内で製造しております。安心安全の日本製です。

床ずれ防止機能付車いすシート

ラクラ 2WAYシート

新機能

背当てが膝当てにも使える 2WAY仕様。
高反発ウレタンに床ずれ防止パッドを装着。
床ずれ防止機能付き車いすクッション。

月額レンタル料金 円
ご利用者負担額 円



介護保険貸与製品 車いす付属品

希望小売定価（税別）

14,000円

品番：RKCS-2W

TAIS：01149-000019

JAN：4582328920643

シート部：40×40×5 cm

背当て部：40×20×5 cm

カバー：ポリエステル 100%

クッション部：高反発ウレタン

パッド部：ポリエステル 100%

すべり止め部：アクリル

製造：日本製

(高反発性)

・動きやすく、座り心地抜群です。

(高通気性)

・ムレなく、快適に座れます。

(丸洗いOK)

・メンテナンス簡単で清潔です。

(耐久性抜群)

・高品質なので、簡単にへたりません。

(裏全面すべり止め)

・車いすからのズレを防ぎます。

●背当てとして。

背当てとして使用すれば、腰痛対策に有効です。




●膝当てとして。

膝下に当てれば、前すべり防止にもなります。



●優れた体圧分散性。

高反発で抜群の体圧分散性で、通気性、体圧分散性を向上させ、座り心地を改善します。
(使用前) (使用后)

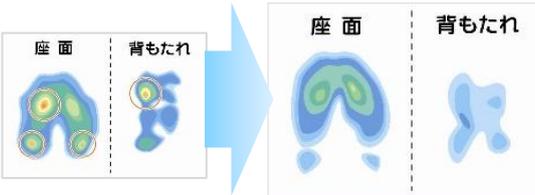

【ラクラ 2WAYシートの構造】

ラクラ 2WAYシートは、低価格にも関わらず、床ずれ防止にも使える高機能な素材の組み合わせでできています。

●床ずれ防止用パッド 1cm装着。

床ずれ防止用に使用されるパッド、旭化成「フュージョン®」1cm厚を座面部および背当て部にそれぞれ接着し、車いすクッションでありながら、床ずれ防止効果もあります。

●丸洗いOKの高反発ウレタン 4cm。

背当て、座面のクッション部には、丸洗い出来る透水性に優れた「高反発ウレタン4cm」を使用しています。弾力性、体圧分散性に優れた素材で、長時間使用しても疲れにくい。

●インナーカバーは洗濯ネット代わり。

中材（クッション部、パッド部）をカバーするインナーカバーは、丈夫なポリエステルメッシュを採用しております。

●アウターカバーはダブルラッセル。


アウターカバーは、立体繊維「ダブルラッセル」を使用しています。速乾性に優れ、通気性、クッション性にも優れた素材です。

●座面の裏側は、全面すべり止め加工。

座面裏側は、全面すべり止め加工を施してあるので、どんな車いすでも、車いすからのズレを防いでくれます。



ラクラ2WAYシートは、背当てとシート部に、三次元立体編物くフュージョン®旭化成商事を使用しています。

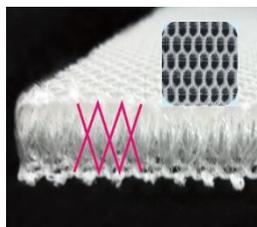

製造元

ボディドクターメディカルケア株式会社

〒606-8152 京都市左京区一乗寺下り松町 56-1

TEL075-724-8412 (代) FAX075-724-8413

Email support@bdmc.jp

URL http://www.bdmc.jp



※本カタログの価格はメーカー希望価格で消費税は含んでおりません。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合がございます。また、仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。