

この度、弊社<ブレイラハイブリッド・ケアマットレス>をお買い上げいただき、誠に有難うございます。この「取扱説明書」には、<ブレイラハイブリッド・ケアマットレス>を安全にお使いいただくための注意事項や正しい使用方法等を記載していますので、ご使用前には、必ずこの「取扱説明書」をよくお読んで、安全で正しい取扱方法をご理解いただけますようよろしくお願い致します。

○梱包内容

- ①ラテックスマットレス本体（クッション部）・・・・・・・・1個
- ②ハイブリッドカバー（カバー部）・・・・・・・・・・1枚
- ③上記本体を留めるバンド・・・・・・・・・・・・・・1式（2本）
- ④本取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚

以上計4点


○正しい使用方法

※ラテックスマットレス本体は表と裏では穴の数が違う場合がございますが、品質や機能は全く変わりませんので、特に表裏の区別はありません。


※バンドはマットの移動や保管時に必要となります。無くさないよう大切に保管して下さい。

- 本マットレスはベッドの上に直接敷いてお使い下さい。
- 本マットレスはそれぞれ頭側・足側の区別がありますので正しい方向でお使い下さい。
- 本マットレスのカバーは表面と裏面で、防水性、通気性と異なった機能を有します。どちらの面で使用される場合も、本体に延設されている滑り止めを下図のように使用面の反対に折り込んで下さい。ベッドと本マットレスがずれるのを防ぎ、より快適に安全にご使用いただけます。

通気面使用时

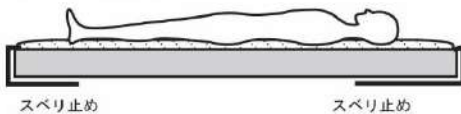

防水面使用时

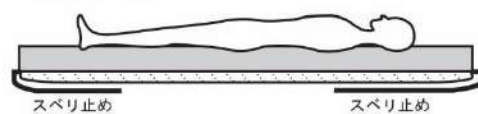

○仕様

- 材質
クッション部・・・・・・・・・・天然ラテックス
カバ ー部 防水面・・・・・・・・・・ナイロン100%
通気面・・・・・・・・・・ポリエステル100%

■サイズスペック/コード/価格表

品名	サイズ(mm)	重量	JAN	TAIS	価格(税抜)
BRHM-910R	910X1950X80	13.5kg	4582328920025	01149-000015	90,000円
BRHM-830R	830X1950X80	12.0kg	4582328920018	01149-000016	90,000円
BRHM-910S	910X1830X80	12.5kg	4582328920056	01149-000017	90,000円
BRHM-830S	830X1830x80	11.5kg	4582328920049	01149-000018	90,000円

⚠ 注意

- 組み立て時は、ラテックスマットレス本体にハイブリッドカバーをやさしく被せて下さい。
無理に被せようとしたり、必要以上に過度な力を加えると、カバー等が破れたり、本体が破損する場合があります。
- 人や物がのった状態のまま移動させないで下さい。
マットレスの上に人や物がのったまま移動させると転落してけがをしたり、マットレスの破損の原因となります。
- 必ずベッドの大きさに合ったサイズをご使用下さい。
ベッドに合っていないサイズをご使用されますと、ベッドとのすき間に落ちたり挟まれたりして、けがをするおそれがありますので、必ず適正なサイズのマットレスを選んでご使用下さい。
- 直射日光や、暖房器具などの熱風が当たる場所でのご使用は避けて下さい。
変質、変色の原因となります。
- マットレスの上に立ち上がるなど、局所的に過度な荷重を掛けしないで下さい。
変形、破損の原因となります。
- インナーカバーは破いて開けないで下さい
中材の保護のためにインナーカバーが掛かっていますので破って外さないでください。
- マットレスの上で敷布団等のご使用はおやめ下さい。
すべて転倒、転落し、けがをするおそれがあります。厚みがある敷布団等はマットレスの機能を妨げるのでおやめ下さい。

○お手入れ方法

※ハイブリッドカバーとラテックスマットレス本体とは分けて、個別にお手入れ下さい。

■ハイブリッドカバーのお手入れ方法

押し洗いもしくは洗濯ネットに入れて洗濯機にて水洗いして下さい。脱水後の乾燥は陰干して下さい。



⊘禁止事項

変色、変質、機能低下の原因になるので、柔軟剤、塩素系漂白剤は絶対に使用しないで下さい。
変形、劣化のおそれがありますので乾燥機のご使用は絶対におやめ下さい。

■ラテックスマットレス本体のお手入れ方法

消毒はアルコール等の噴霧をお勧めいたします。汚れがひどい場合は水による洗浄が可能です。素材自体は水含むと大変重くなり、且つチギレやすいため、手によるやさしく押し洗いをお勧めしています。
機械での洗浄や脱水をされる場合はトルク等を調整し、あらかじめ破損等がないか確認の上ご使用下さい。

⊘禁止事項

紫外線は素材劣化の原因になるので、天日干しは避け、陰干して下さい。
変形、劣化のおそれがありますのでオゾン(消毒)は絶対におやめ下さい。

Dr.Care[®]
ドクターケア

グローバル産業株式会社 ドクターケア事業部

〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色 1770

TEL 046-877-4411 FAX 046-877-4422

Email support@doctorcare.jp URL <http://www.doctorcare.jp>

お問合せ

※本カタログの価格はメーカー希望価格で消費税は含んでおりません。

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合がございます。また、仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。